

IDEXX VetLab Station

Guía de consulta rápida

Para obtener más información sobre el uso de la IDEXX VetLab* Station (por ejemplo, añadir pruebas a un análisis, reasignar resultados e introducir resultados de pruebas SNAP*), visite idexx.com/product-info y/o learn.idexx.com.




Navegación por la pantalla de inicio

Iconos de estado del instrumento

Sepa qué instrumentos están funcionando y/o disponibles con iconos codificados por colores.

- **Verde (Listo):** conectado y comunicado
- **Amarillo (Ocupado/En espera):** en uso o en modo de espera
- **Gris (Fuera de línea):** se ha perdido la conexión
- **Rojo (Alerta):** se ha producido un problema; toque el icono para obtener más información

Centro de mensajes


Pulse  para ver notificaciones de IDEXX.

Indicador IDEXX SmartService

El color del punto indica el estado de conexión de las soluciones de IDEXX SmartService*:

- **Verde:** conectado
- **Amarillo:** en el proceso de conexión
- **Gris:** desactivado
- **Rojo:** fuera de línea

Icono de engranaje


Pulse  para abrir un menú en el que puede acceder a pantallas específicas del instrumento, personalizar la configuración, obtener ayuda, ver mensajes o desconectar el sistema.

Puntos suspensivos (...)

Haga clic en "... " para ver opciones de visualización de la lista de Censo o para eliminar solicitudes de la lista de Pendientes.

Lista de Pendientes

Puede ver qué pacientes tienen solicitudes abiertas en su sistema de gestión de información de práctica (PIMS, Practice Information Management System) integrado.

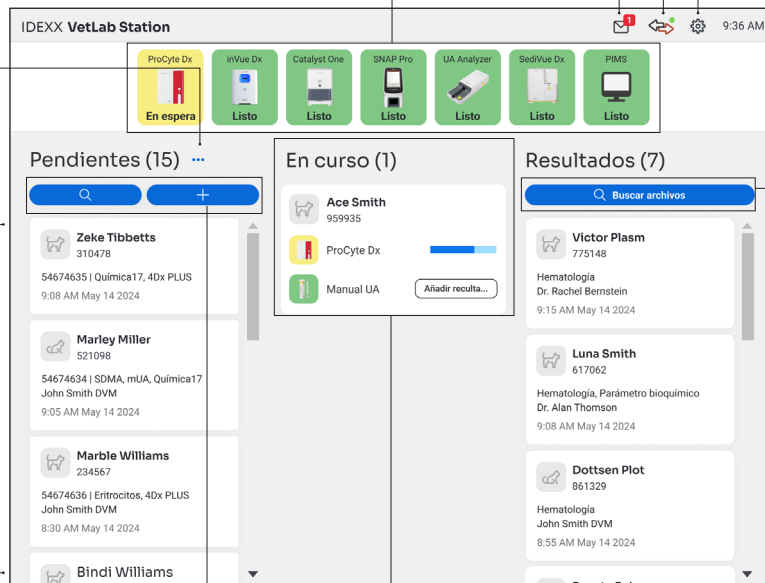

Búsqueda de registros

Puede buscar registros de pacientes.

Resultados

Puede ver una lista de resultados de pacientes en clínica generados en los últimos 7 días. Pulse para seleccionar un paciente y ver o imprimir sus resultados.


Botones para buscar y añadir

Pulse **Buscar** para buscar un paciente en la lista de Pendientes. Pulse **Añadir** para introducir manualmente la información del paciente.

Área En proceso

Puede ver qué pruebas se están ejecutando actualmente, están a la espera de ser ejecutadas o requieren una acción.

Iniciar un análisis de muestra con un PIMS integrado

1. Pulse el paciente deseado en la lista de **Pendientes** o **Censo** en la pantalla de inicio, o pulse  para buscar un paciente en la lista de **Pendientes**.
2. Seleccione los instrumentos que desee y pulse **Analizar**.

Iniciar un análisis de muestra directamente en la IDEXX VetLab Station

Pulse  en la pantalla de inicio y, a continuación, haga lo siguiente:

Si es un paciente nuevo:

1. Pulse **Añadir nuevo paciente**, introduzca la información del paciente/cliente y pulse **Siguiente**.
2. Confirme/especifique la información del paciente/clínica, seleccione los instrumentos que desee y pulse **Analizar**.

Si es un paciente existente:

1. Pulse en el cuadro **Paciente, Apellido** o **ID de cliente** y, a continuación, empiece a escribir la información correspondiente. A continuación, pulse para seleccionar el paciente deseado de la lista y pulse **Siguiente**.
2. Confirme/especifique la información del paciente/clínica, seleccione los instrumentos que desee y pulse **Analizar**.

Si es un paciente en situación de emergencia:

1. Pulse **Estadística**.
2. Seleccione la **Especie** y **Etapas de vida**. El sistema introduce automáticamente una marca de tiempo única para identificar al paciente (que puede utilizarse más tarde al reasignar los resultados de las pruebas).
3. Pulse **Siguiente**.
4. Seleccione los instrumentos que desee y pulse **Analizar**.

Introducir o editar resultados manuales de prueba SNAP

Para introducir resultados manuales de prueba SNAP:

1. Pulse el icono **SNAP** en el área En proceso o pulse **Introducir resultados** en el cuadro de diálogo Cronómetro SNAP completo.
2. Pulse la imagen que coincida con la ventana del resultado de la prueba SNAP.
3. (Opcional) Pulse la pestaña **Comentario** y, a continuación, introduzca su identificación de usuario y un comentario para este resultado de prueba.
4. Pulse **Guardar**.

Para editar resultados de prueba SNAP:

1. En la pantalla de resultados, pulse **Gestionar resultados**.
2. Pulse **Editar resultados manuales** y, a continuación, seleccione el resultado de la prueba SNAP que desea editar.
3. Realice los cambios necesarios y pulse **Guardar**.

Introducir propiedades manuales físicas y químicas del análisis de orina



Para añadir propiedades químicas y físicas a la orina durante un análisis:

1. Inicie el análisis de orina.
2. Cuando se le pida que seleccione los iconos de los instrumentos deseados, pulse el icono **Análisis de orina manual** y, a continuación, seleccione el método de recolección, el color y la claridad de la muestra.
3. Introduzca la gravedad específica de la muestra.
4. Pulse el color que coincida con el pH de muestra.
5. Si todos los análisis bioquímicos tienen resultados normales, pulse **Configurar todo en negativo/normal**; de lo contrario, especifique los resultados adecuados. (Si solo cambió algunos resultados, pulse **Siguiente** cuando finalice).
6. Introduzca algún comentario y pulse **Listo**.

Para editar propiedades manuales del análisis de orina:


1. En la pantalla de resultados, pulse **Gestionar resultados**.
2. Pulse **Editar resultados manuales** y, a continuación, seleccione el resultado del análisis de orina manual que desea editar.
3. Realice los cambios necesarios y pulse **Guardar**.

Ver e imprimir resultados


1. Elija una de las siguientes opciones:
 - + Pulse el paciente en la lista de Resultados de la pantalla de inicio.
 - + Pulse el mensaje de alerta sobre resultados nuevos.
 - + En la sección Resultados de la pantalla de inicio, pulse  **Buscar archivos**, busque y seleccione el paciente deseado y, a continuación, pulse **Ver**.
2. Pulse la pestaña que contiene los resultados deseados.
3. Pulse  para imprimir un informe integral de todos los resultados de pruebas de la pestaña seleccionada.

Mantenimiento semanal

IDEXX recomienda que reinicie el sistema de forma semanal.

1. Pulse  y, a continuación, pulse **Desconectar**.
2. Pulse **Desconectar** o **Reiniciar**.

Personalizar la configuración

Puede personalizar la IDEXX VetLab Station para satisfacer las necesidades de su clínica. Pulse  y, a continuación, pulse **Configuración**.